



⊠

Kern-

auf der

richt SA metr Vokabular

linken Seite

einrichten

Taste sichtbar

Taste sichtbar

Bild individuell

Wortart Verb

Text

Funktion sprich

Audio

00:00

Durch Doppelklick auf die Taste öffnen.

Hintergrund einfärben

Bild individuell

 durch Kamera oder Foto aus dem Fotoalbum machen

Bildtext individuell

- Wortart einstellen (wenn Popups gewünscht)
- Wort eingeben (ggf. mit Flexionen für Popups)



Sprach-

aufnahme

Funktion

- sprich
- gehe zu für Links
- sprich und geh für anschließende Weiterleitung

Seiten-Editor

Speichern



Abbrechen

- Suchbegriff eingebenTaste auf ein leeres
- Feld der Seite schieben
- leere Taste rechts daneben in den Papierkorb schieben

Neue Seite anlegen:

Suchbegriff eingeben und

Wortpfad anzeigen,

kopieren, als Foto

speichern

Q

Suchfunktion

- 1. neue Seite anlegen im Seitenmanager
- 2. auf die Seite gehen, auf die der Link soll.
- 3. Layouteditor öffnen, Symboltaste einfügen
- 4. Tasteneditor öffnen, Farbe hellblau, Funktion "Gehe zu" einstellen, neue Seite auswählen.

Rastergröße

exportieren,

übertragen,

sichern

Vokabular



- neue Seiten erstellen
- Seiten duplizieren
- Seiten umbenennen
- Seiten löschen
- markierte Seiten exportieren
- empfangene/ heruntergeladene Seiten importieren

MetaTalkDE Einstellungen

- nach Tastendruck auf der Seite bleiben/auf Startseite gehen
- Farben für Wortarten festlegen
- Suchfunktion und Memobox immer aktiv/nur im Editiermodus

